

Dla pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych 50K90 Agilium Softfit

Niezależnie od wskazań, codzienne nawyki użytkownika i indywidualne preferencje dotyczące designu, odgrywają istotną rolę w wyborze odpowiedniego zaopatrzenia dla pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Orteza Agilium Softfit, stanowi nową alternatywę w istniejącym portfolio.

Orteza wykonana jest z komfortowego materiału z wbudowaną szyną od strony zewnętrznej. Szyna posiada regulację kąta zgięcia i wyprostu w stawie kolanowym. 3-punktowa zasada podparcia oraz regulacja wygięcia szyny bocznej, umożliwia dopasowanie do kolan szpotawych, jak i koślawych. Dostępna jest w wersji na lewą i prawą nogę.

Korzyści w skrócie

- Sprawdzona 3-punktowa zasada podparcia
- Szybkie i łatwe dopasowanie do pacjenta w kilku krokach
- Proste ustawienie szpotawości i koślawości poprzez regulację szyny bocznej
- Komfort noszenia bez ześlizgiwania się dzięki innowacyjnej kombinacji materiałów



Kąt wygięcia szyny należy ustawić za pomocą klucza imbusowego powyżej przegubu. Umożliwia to odpowiednie dostosowanie kąta szpotawości lub koślawości kolana.

▶ Więcej informacji dostępne jest na naszej stronie internetowej: www.ottobock.pl

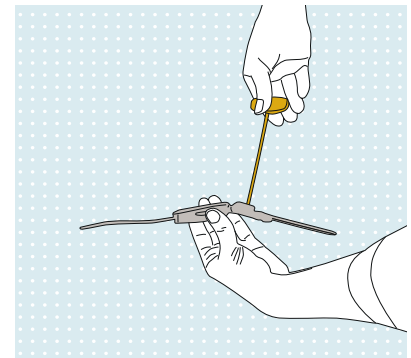
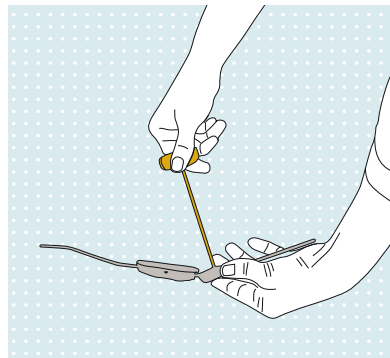


Tabela rozmiarów

		Obwód	S	M	L	XL	XXL
	A	cm	35 – 38	38 – 41	41 – 44	44 – 48	48 – 51
		inches	13.8 – 15.0	15.0 – 16.1	16.1 – 17.3	17.3 – 18.9	18.9 – 20.1
	B	cm	44 – 48	48 – 52	52 – 56	56 – 61	61 – 67
		inches	17.3 – 18.9	18.9 – 20.5	20.5 – 22.0	22.0 – 24.0	24.0 – 26.4

www.ottobock.pl

Zajrzyj na nasz profil i polub nas:

www.facebook.com/Otto.Bock.Polska

[Instagram.com/Ottobock_Poland](https://www.instagram.com/Ottobock_Poland)