

4R10=111 Quickchange

Jedno kliknięcie - nieograniczone opcje

Istnieje wiele powodów, dla których użytkownicy protez mogą chcieć zastosować inne stopy protetyczne do zróżnicowanych sytuacji: Na przykład stopę protetyczną, która ma dodatkowe funkcje lub właściwości chodzenia lub jest wodoodporna, lub mogą chcieć innej wysokości pięty lub mieć szerszy wybór butów na specjalne okazje, mogą także chcieć uprawiać sport. Dzięki adapterowi Quickchange osoby po amputacji same zmieniają stopę protetyczną w razie potrzeby.

1 Część górna

jest montowana pod lejem podudziowym lub przegubem kolanowym. Magnesy pomagają przy pozycjonowaniu i tworzą wstępne połączenie między górną i dolną częścią adaptera.

2 Część dolna

jest montowana nad stopą protetyczną. Dwie części dolne są objęte zakresem dostawy, dzięki czemu można używać różnych stóp protetycznych do jednej protezy. Jeśli mają być stosowane dodatkowe stopy protetyczne, dolna część jest dostępna jako opcjonalna część zamienna (4R10 = 01).

3 Pin blokujący

zapewnia ostateczne połączenie między górną i dolną częścią adaptera. Zmieniając stopy, użytkownik po prostu ręcznie zaciska pin. Jest on również dostępny jako część zamienna (4X345).



Korzyści:

- Wolny wybór:
Użytkownik może używać stóp z różnymi funkcjami.
- Łatwa instalacja:
Zastosowanie Quickchange nie wpływa na osiowanie protezy. Adapter jest montowany tak jak każdy komponent strukturalny.
- Zaopatrzenie próbne:
Przetestowanie różnych stóp protezowych jest wyjątkowo łatwe.
- Bezpieczeństwo:
Quickchange został przetestowany zgodnie z ISO 10328.
- Łatwy w użyciu:
Użytkownicy mogą obsługiwać Quickchange samodzielnie i bez odpowiednich narzędzi.

Dane techniczne

MOBIS	2-4
Max. waga ciała*	125 kg
Zakres zastosowania	TT,TF/KD/HD poniżej przegubu kolanowego
Połączenie bliższe	Adapter piramidowy
Połączenie dalsze	Połączenie na 4 śruby
Waga	220 g
Wysokość systemowa	12 mm
Materiał	Aluminium
Wodoodporność	również słodka i słona woda
Możliwe kombinacje	Genium X3, Genium, rodzina Triton, Challenger

*Przy kombinacji z wybranymi stopami protetycznymi, dopuszczalna maksymalna waga użytkownika może ulec zmianie.